

VISAGE STUDIO

ECHIPAMENTE PROFESIONALE AVANSATE
PENTRU STANDARDE ÎNALTE

CryoSoft criolipoliză cu 2 capete

Patru tehnologii într-un singur aparat:
criolipoliză cu vacuum, cavitație 40 kHz,
radiofrecvență multipolară și lipolaser,
pentru reducerea depozitelor adipoase
localizate și remodelare corporală.



**PATRU TEHNOLOGII.
O SINGURĂ PLATFORMĂ.**

2

capete de
criolipoliză

40kHz

cavitație
ultrasonică

5MHz

radiofrecvență
multipolară

650nm

lipolaser
6 paduri



Scanează
pentru produs

Fișă de prezentare și parametri tehnici

VEZI PRODUSUL PE VISAGESTUDIO.RO

visagestudio.ro/products/aparat-criolipoliza-cu-2-capete-rf-cavitate-40khz-lipolaser-cryosoft

PREZENTARE

Patru tehnologii care lucrează împreună

CryoSoft combină răcirea controlată a țesutului adipos cu trei tehnologii complementare de remodelare. Criolipoliza elimină celulele adipoase prin cristalizare la temperaturi scăzute, iar cavitația, radiofrecvența și lipolaserul susțin drenajul, fermitatea pielii și reducerea circumferinței.

Criolipoliză cu vacuum

- Trigliceridele se solidifică la temperaturi scăzute; celulele adipoase sunt eliminate treptat, fără a afecta țesuturile din jur.
- Suprafața de contact reglează temperatura pielii și protejează structurile dermice fine.
- Două capete de dimensiuni diferite, cu vacuum reglabil.

Cavitație ultrasonică 40 kHz

- Unda sonoră de 40 kHz pătrunde în stratul adipos și produce vibrații puternice în celule.
- Frecarea dintre celule le consumă energiile și apa și le reduce volumul.
- Impactul vibrației rupe celulele adipoase și eliberează acizii grași.

Radiofrecvență multipolară


- Unda electromagnetică traversează dermul și țesutul subcutanat.
- Căldura ajunge în profunzime și accelerează regenerarea țesutului.
- Colagenul se contractă imediat, iar producția de colagen nou este stimulată: pielea fermă, riduri atenuate.

Lipolaser 650 nm


- Laser de nivel scăzut (cold laser), fără chirurgie și fără perioadă de recuperare.
- Reduce circumferința și grăsimea localizată pe aproape toate zonele corpului.
- Se aplică prin 6 paduri fixate cu benzi elastice, în 3 moduri de lucru.

Funcții principale

Remodelare corporală · Reducerea aspectului de celulită · Grăsime localizată · Drenaj limfatic · Fermitatea pielii · Relaxare și circulație

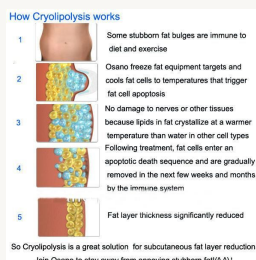

Mecanismul criolipolizei: răcire controlată și eliminare treptată

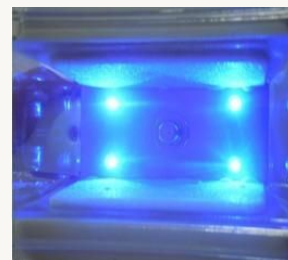

Padurile de răcire ale capului de criolipoliză

■ PROTOCOL DE LUCRU

Parametri recomandați pe sistem

Criolipoliză + vacuum

Zonă	Durată	Intensitate	Timp vacuum	Timp pauză	Ritm
Abdomen sau picior	15 - 20 minute	-3	0,5 - 1,5 s	2 - 3 s	1 - 2 ședințe la 10 - 15 zile

REGULI PENTRU CRIOLIPOLIZĂ

Temperatura se reglează între +10 °C și -10 °C, pornind de obicei de la 10 °C. Timpul de aspirație se setează între 0,5 și 9 secunde, iar pauza între 0 și 4 secunde — timpul de vacuum trebuie să fie mai mic decât cel de pauză. Folosiți întotdeauna membrana de protecție. Nu mențineți capul în aceeași zonă timp îndelungat: pielea poate fi lezată și pot apărea vezicule.

Cavitație 40 kHz și radiofrecvență corporală

Zonă	Durată	Intensitate	Ritm
Abdomen	15 minute	6 - 8	de 2 - 3 ori pe săptămână
Picior	15 minute	6 - 8	de 2 - 3 ori pe săptămână
Braț	15 minute	5 - 7	de 2 - 3 ori pe săptămână

Ambele sisteme au trei moduri de lucru: modul 1 continuu, modurile 2 și 3 în impulsuri. Intensitatea se reglează de la 1 la 10.

Lipolaser · cură completă

Etapă	Ritm	Durata ședinței	Recomandări
Săptămâna 1	o ședință la 2 zile	20 - 30 minute	Curățați zona înainte de tratament
Săptămâna 2	o ședință la 2 - 3 zile	20 - 30 minute	Se poate combina cu o cremă de remodelare
Săptămâna 3	o ședință la 3 zile	20 - 30 minute	Curățați pielea și padurile după fiecare ședință


Lipolaserul are 3 moduri de lucru, intensitate reglabilă de la 1 la 18 și temporizare de la 1 la 30 de minute, pe 6 paduri.

Recomandări generale

Începeți fiecare tratament de la energia minimă și creșteți progresiv, în funcție de reacția clientului. Aplicați produsul potrivit fiecărei tehnologii: antifriz pentru criolipoliză și gel pentru cavitație și lipolaser. Capul de lucru se deplasează continuu, fără a fi menținut pe loc.




Coapse

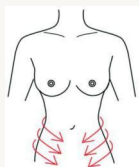

Abdomen



Brațe

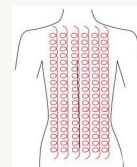

Spate

FIȘĂ TEHNICĂ

Parametri tehnici principali

Tehnologii	Criolipoliză cu vacuum, cavitație 40 kHz, radiofrecvență multipolară, lipolaser
Tensiune de alimentare	AC 110 V / 220 V, 50 - 60 Hz
Putere	800 W
Ecran	ecran tactil de 8,4 inch
Temperatură criolipoliză	-10 °C ... 10 °C
Capete de criolipoliză	2 bucăți: 15 × 6 cm și 18 × 8 cm
Presiune de ieșire (vacuum)	0 - 90 kPa
Aspirație / pauză	0,5 - 9 s / 0 - 4 s, reglabile
Frecvență cavitație	40 kHz
Frecvență radiofrecvență	5 MHz
Lungime de undă lipolaser	650 nm, 6 paduri
Rezervor de apă	cca. 4 litri de apă purificată
Dimensiuni ambalaj	73 × 47 × 57 cm
Greutate	30 kg



Pachet Visage Studio

- Garanție 24 luni pentru persoane juridice
- Service propriu în România, 5 ani post-garanție
- Training gratuit și suport tehnic
- Manual în limba română, declarație și certificat de conformitate
- Finanțare în rate și opțiuni de plată pentru firme

Conținutul pachetului

- Unitate principală · 2 mâner de criolipoliză
- 10 membrane antifriz
- 1 cap de radiofrecvență · 1 cap de cavitație
- 6 paduri lipolaser și 6 benzi elastice
- Pâlnie pentru apă, cablu de alimentare, 2 siguranțe
- 2 seturi de suporturi ABS · manual de utilizare

Siguranță și utilizare responsabilă

Aparatul este destinat exclusiv utilizării profesionale. Nu se aplică pe ochi, gât, urechi, glotă și zona genitală, pe mucoase, mameloane sau nevi. Nu se utilizează la copii sub 7 ani. Timpul de funcționare continuă nu trebuie să depășească o oră; apoi se oprește alimentarea și se lasă aparatul să se răcească 20 - 30 de minute. Aparatul nu stabilește diagnostice medicale și nu înlocuiește consultația medicală.

Document informativ. Specificațiile și accesoriile pot varia în funcție de configurația comercială disponibilă.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Punere în funcțiune și contraindicații

Pași de punere în funcțiune


- Așezați aparatul stabil și conectați capetele și alimentarea.
- Umpleți rezervorul cu apă purificată (cca. 4 litri), până când apa iese prin orificiul de preaplin.
- Conectați mânerul de criolipoliză și verificați conexiunea; curățați și dezinfecțați accesoriile.
- Porniți aparatul. Dacă circuitul de apă nu funcționează, se aude o alarmă și apare mesajul „Error” — opriți imediat aparatul și verificați nivelul apei și conexiunea mânerului.
- Curățați pielea, aplicați produsul potrivit, apoi reglați intensitatea, vacuumul și durata.
- La final opriți emisia, apoi alimentarea; curățați accesoriile.

Contraindicații

- Sarcină și perioada menstruală
- Epilepsie și afecțiuni psihice
- Afecțiuni maligne
- Plăgi postoperatorii nevindecate
- Inflamații acute și boli infecțioase
- Afecțiuni cardiace sau stimulator cardiac
- Afecțiuni renale sau litiază biliară
- Implanturi metalice sau de silicon
- Perioada de contracepție, incontinență urinară, intervenții abdominale recente
- Hipersensibilitate genetică



Ecran principal

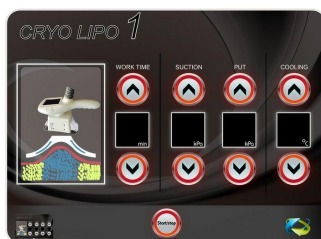

Criolipoliză



Cavitație 40 kHz



Lipolaser



Cap criolipoliză



Cap cavitație



Cap radiofrecvență



Pad lipolaser