

VISAGE STUDIO

ECHIPAMENTE PROFESIONALE AVANSATE
PENTRU STANDARDE ÎNALTE

Liposonix topirea grăsimii, celulită, slăbire

Ultrasunete focalizate de mare intensitate (HIFU) care distrug termic celulele adipoase la 1,3 cm sub piele, într-o singură ședință de aproximativ o oră, fără intervenție chirurgicală și fără perioadă de recuperare.

O ORĂ. O ȘEDINȚĂ.
REZULTAT ÎN 8-12 SĂPTĂMÂNI.

4MHz

frecvență de
lucru

1,3cm

adâncime de
focalizare

576

puncte pe
impuls

525

impulsuri pe
cartuș



Scanează
pentru produs

Fișă de prezentare și parametri tehnici

VEZI PRODUSUL PE VISAGESTUDIO.RO

visagestudio.ro/products/aparat-profesional-liposonix-pentru-topirea-grasimilor-eliminarea-celulitei-slabire



PREZENTARE

Energie focalizată exact în stratul adipos

Spre deosebire de tehnologiile cu ultrasunete de intensitate mică sau nefocalizate, Liposonix concentrează energia într-un punct precis, la 1,3 cm sub suprafața pielii. Energia se transformă în căldură și distruge ireversibil celulele adipoase, fără a leza pielea sau țesuturile din jur.

01

Distrugere termică

Ultrasunetele de mare intensitate produc o leziune termică ireversibilă a celulelor adipoase și reduc numărul acestora.

02

Focalizare inteligentă

Sistemul de scanare focalizează energia strict în stratul adipos, la 1,3 cm sub piele; suprafața rămâne neafectată.

03

Colagen nou

Căldura stimulează contracția și proliferarea collagenului, care umple treptat spațiul rămas — pielea rămâne netedă și fermă.

Reacția dublă a țesutului

Distrugerea și eliminarea celulelor adipoase · Contracția și proliferarea collagenului subcutanat

Zone tratabile

- Abdomen
- Flancuri (talie laterală)
- Fese
- Brațe („aripi de fluture”)
- Coapse

Se poate trata orice zonă unde se poate prinde între degete un pliu de aproximativ 2,5 cm de țesut adipos.

Ce știe clientul dinainte

- O ședință durează aproximativ o oră.
- După ședință pot apărea o ușoară durere, sensibilitate, echimoze, roșeață sau edem — reacții normale, ușoare și temporare.
- Zona tratată se reduce progresiv.
- Rezultatele se observă de regulă la 8 - 12 săptămâni, timpul necesar organismului pentru a procesa țesutul adipos distrus.



Zonele de tratament



Împărțirea zonei în pătrate de 6 x 6 cm

■ PROTOCOL DE TRATAMENT

Ședința, pas cu pas

1

Evaluare

Verificați dacă zona are grosimea de țesut adipos necesară și înregistrați măsurătorile inițiale.

2

Marcare

Curățați zona cu alcool și marcați suprafața de tratat, apoi împărțiți-o în pătrate de 6 × 6 cm.

3

Mediu de cuplare

Aplicați gel pe piele sau pulverizați apă pură ca mediu de cuplare înainte de tratament.

4

Alegerea cartușului

Montați pe mâner cartușul potrivit adâncimii zonei tratate.

5

Tratament

Parcurgeți pătratele marcate unul câte unul, cu parametrii aleși; ședința durează aproximativ o oră.

6

Finalizare

Curățați pielea la finalul tratamentului și programați controlul de urmărire.

Cartușe disponibile

Cartuș	Disponibilitate	Utilizare
0,8 cm	Standard	Zone cu strat adipos mai subțire
1,3 cm	Standard	Adâncimea de referință a tratamentului Liposonix
0,6 cm	Opțional	Zone superficiale
1,0 cm	Opțional	Zone intermediare
1,6 cm	Opțional	Strat adipos gros



Cartușele de tratament



Montarea cartușului pe mâner

REGULA SUPRAFEȚEI

Zona de tratat se împarte în pătrate de 6 × 6 cm, care se parcurg pe rând. Nu se lucrează pe zone cu strat adipos mai subțire de 20 mm.

FIȘĂ TEHNICĂ

Parametri tehnici principali

Tehnologie	Ultrasunete focalizate de mare intensitate (HIFU)
Frecvență de lucru	4 MHz
Energie	30 - 75 J/cm ² , reglabilă
Niveluri de intensitate	5, reglabile continuu
Adâncime de focalizare	1,3 cm sub suprafața pielii
Puncte pe impuls	576
Impulsuri pe cartuș	525
Cartușe standard	0,8 cm și 1,3 cm
Cartușe opționale	0,6 cm, 1,0 cm și 1,6 cm
Ecran	ecran tactil color
Consum	sub 580 VA
Alimentare	AC 220 V, 50 Hz / AC 110 V, 60 Hz
Siguranță fuzibilă	F 10 AL 250 V
Mediu de lucru	5 - 40 °C, umiditate ≤ 80 %, 86,0 - 106,0 kPa
Dimensiuni aparat	65 × 71 × 124 cm
Mod de funcționare	continuu



Unitate principală cu mânerul de tratament

Pachet Visage Studio

- Garanție 24 luni pentru persoane juridice
- Service propriu în România, 5 ani post-garanție
- Training gratuit și suport tehnic
- Manual în limba română, declarație și certificat de conformitate
- Finanțare în rate și opțiuni de plată pentru firme

Siguranță și utilizare responsabilă

Aparatul este destinat exclusiv utilizării profesionale. Tratamentul se aplică numai pe zone cu strat adipos de cel puțin 20 mm și niciodată pe cap, gât, spate sau piept. Nu se lucrează fără mediu de cuplare. Se evită organele interne și structurile osoase. Aparatul nu stabilește diagnostice medicale și nu înlocuiește consultația medicală.

Document informativ. Specificațiile și accesoriile pot varia în funcție de configurația comercială disponibilă.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Cui i se adresează și cui nu

Indicat pentru

- Persoane cu așteptări rezonabile privind reducerea în volum
- Grăsime localizată pe abdomen, talie, spate, coapse și brațe
- Clienți care nu doresc o intervenție chirurgicală și nu își permit o perioadă de recuperare

Zona trebuie să permită prinderea între degete a unui plu de aproximativ 2,5 cm de țesut adipos.

Contraindicații

- Zone cu strat adipos sub 20 mm și zonele cap, gât, spate, piept
- Organe interne și structuri osoase
- Perioada menstruală, pentru tratamentul abdominal
- Implanturi metalice, din plastic sau silicon în zona tratată
- Proteze auditive, stimulatoare cardiace și alte dispozitive medicale electronice implantate
- Inimă artificială și alte aparate electronice de susținere a vieții
- Iritații sau inflamații cutanate
- Teren alergic, în special piele foarte sensibilă
- Copii sub 12 ani și persoane cu așteptări nerealiste privind rezultatul estetic
- Sarcină și hernie în zona de tratat



Aplicarea tratamentului



Cartușele și numărul de impulsuri pe zonă