


VISAGE STUDIO

ECHIPAMENTE PROFESIONALE AVANSATE
PENTRU STANDARDE ÎNALTE

RELIFT radiofrecvență fracționată

Microace izolate cu vârf aurit și
radiofrecvență fracționată, pentru lifting
facial, cicatrici, vergeturi, riduri și pori dilatați
— cu cap suplimentar de termoșoc pentru
calmarea imediată a pielii.

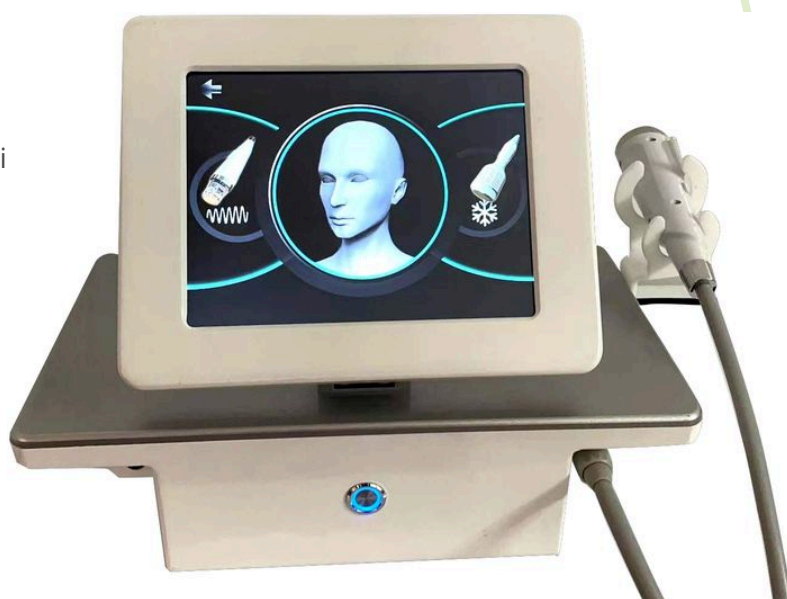

**MICROACE IZOLATE.
RADIOFRECVENȚĂ ÎN PROFUNZIME.**

0,25-3mm

adâncime de
penetrare

2-4MHz

frecvență de
ieșire

200w

putere
maximă

4

tipuri de
cartușe



Scanează
pentru produs

Fișă de prezentare și parametri tehnici

VEZI PRODUSUL PE VISAGESTUDIO.RO

www.visagestudio.ro/produs/aparat-radiofrecventa-fractionata-pentru-lifting-facial-tonifiere-cicatrici-riduri-si-albire-relift

PREZENTARE

Microacul deschide calea, radiofrecvența face restul

RELIFT combină puncția cutanată cu microace și energia de radiofrecvență. Zeci de microace ceramice izolate pătrund rapid în piele, eliberează energie de radiofrecvență exact la adâncimea aleasă și se retrag imediat, repetând ciclul până la finalul tratamentului.

01

Stimulare mecanică

Puncția microacelor, împreună cu efectul biologic și termic al radiofrecvenței, activează sistemul propriu de reparare al pielii.

02

Canal de absorbție

Penetrarea microacelor deschide un canal rapid de absorbție, prin care principiile active pătrund în piele.


03

Energie la țintă


Energia emisă din vârful microacului acționează selectiv asupra foliculului pilos și a glandelor sebacee și activează sistemul antiinflamator.

Ace izolate: energie doar în vârf

Corpul acului nu transmite energie · epidermul nu este ars · risc redus de pigmentare · disconfort minim

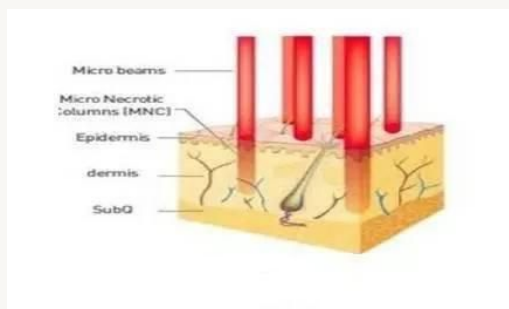

Microacele eliberează energia la adâncimea stabilită

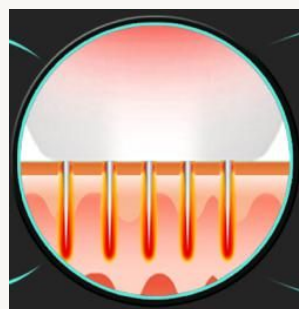

Zonele de coagulare create în derm

Ce tratează


- **Riduri și fermitate:** riduri periorbitale, ale frunții, ale gâtului și din jurul ochilor
- **Rejuvenare:** pori dilatați, ten fără strălucire, textură neuniformă, tonus inegal
- **Cicatrici:** cicatrici post-traumatice, vergeturi, semne de întindere
- **Acnee:** semne de acnee, cicatrici atroifice, comedoane

■ **CAPETE ȘI CONSUMABILE**

Două capete de lucru, patru tipuri de cartușe

Cap de radiofrecvență fracționată


- Microace ceramice izolate, cu vârf aurit
- Adâncime de penetrare reglabilă între 0,25 și 3 mm
- Energia de radiofrecvență se reglează pe o scală de la 5 la 150
- Aspirație integrată, reglabilă pe trepte
- Reglaj fin al cursei acului direct din interfață

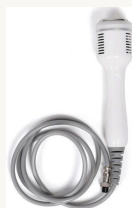

Cap de radiofrecvență fracționată

Cap de termșoc (cold hammer)

- Răcire fiziologică la 1 - 5 °C, aplicată imediat după ședință
- Contractă vasele și micșorează aspectul porilor
- Întărește fibrele de collagen: pielea ridicată și elastică
- Reduce metabolismul local și, odată cu el, roșeața, edemul și disconfortul
- Indicat în special pentru pielea sensibilă și reactivă

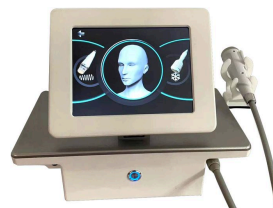

Ambele capete, montate pe aparat

Cartușe de unică folosință

10 pini

Zone înguste și greu accesibile

25 pini

Față

64 pini

Corp și suprafețe mari

Nanochip

Lifting și fermitate



Cele patru tipuri de cartușe sterile



Montarea cartușului pe capul de lucru

CARTUȘELE SUNT DE UNICĂ FOLOSINȚĂ

Fiecare cartuș este steril și se folosește pentru un singur client. Un cartuș cu 10 sau 25 de pini nu se refolosește și nu se aplică pe alt client.

FIȘĂ TEHNICĂ

Parametri tehnici principali

Tehnologie	Radiofrecvență fracționată cu microace izolate, cu vârf aurit
Frecvență de ieșire	2 - 4 MHz
Putere de ieșire	10 - 200 W
Scala de energie	5 - 150
Adâncime de penetrare	0,25 - 3 mm, reglabilă
Cartușe	10 pini, 25 pini, 64 pini și nanochip
Capete de lucru	2: radiofrecvență fracționată și termoșoc
Temperatură cap de termoșoc	1 - 5 °C
Aspirație	reglabilă, trepte 0 - 2
Interfață	ecran tactil, 8 limbi disponibile
Alimentare	AC 110 V - 220 V, 50 / 60 Hz



Unitate principală, vedere din spate

Pachet Visage Studio

- Garanție 24 luni pentru persoane juridice
- Service propriu în România, 5 ani post-garanție
- Training gratuit și suport tehnic
- Manual în limba română, declarație și certificat de conformitate
- Finanțare în rate și opțiuni de plată pentru firme

Contraindicații

- Infecții sau afecțiuni ale pielii (cu excepția acneei)
- Boli hemoragice sau tratament cu anticoagulante
- Sarcină
- Predispoziție la cicatrici cheloide
- Stimulator cardiac sau alte dispozitive electronice implantate
- Stenturi vasculare sau implanturi metalice
- Tumori maligne cutanate

Siguranță și utilizare responsabilă

Aparatul este destinat exclusiv utilizării profesionale, de către personal instruit. Se începe întotdeauna de la energia minimă și se crește progresiv, în limita toleranței clientului. Tratamentul nu se repetă de mai multe ori pe aceeași zonă în cadrul aceleiași ședințe. Aparatul nu stabilește diagnostice medicale și nu înlocuiește consultația sau tratamentul medical.

Document informativ. Specificațiile și accesoriile pot varia în funcție de configurația comercială disponibilă.

■ PROTOCOL DE TRATAMENT

Parametri orientativi pe zonă

Zonă tratată	Adâncime	Timp de emisie	Aspirație	Energie RF
Frunte	0,5 - 1,0 mm	0,2 - 0,3	1 - 2	5 - 50 W
Față	1,0 - 1,5 mm	0,2 - 0,3	1 - 2	5 - 50 W
Conturul ochilor	0,5 - 1,0 mm	0,2 - 0,3	1 - 2	5 - 50 W
Bărbie	0,5 - 1,2 mm	0,2 - 0,3	1 - 2	5 - 50 W
Nas	0,5 - 1,0 mm	0,2 - 0,3	1 - 2	60 - 100 W
Gât	1,0 - 1,5 mm	0,2 - 0,3	1 - 2	60 - 100 W
Cicatrici de acnee	1,0 - 2,0 mm	0,2 - 0,3	1 - 2	60 - 100 W
Cicatrici	1,0 - 2,0 mm	0,2 - 0,3	1 - 2	60 - 120 W
Abdomen	1,0 - 3,0 mm	0,2 - 0,3	0 - 1	60 - 120 W

ALEGEREA ENERGIEI


Scala de energie este 5 - 150. Pentru tratamentele faciale se pornește de la valoarea minimă de 5, iar valoarea se alege în funcție de toleranța clientului.

Desfășurarea ședinței


- **Curățare** — curățare profundă a pielii.
- **Anestezie de contact** — cremă pe zona de tratat, acoperită cu folie, cca. 30 de minute.
- **Calmare** — mască rece pentru sedarea pielii.
- **Tratament** — 15 - 20 de minute; una sau două treceri, fără repetări multiple.
- **Reluare** — după căderea crustelor, la 3 - 4 săptămâni; o cură are 3 - 5 ședințe, câte una pe lună. Zona nu se udă 24 de ore.

Ce urmează după ședință

- **Ziua 1:** senzație de căldură, roșeață și edem ușor.
- **Zilele 2 - 3:** exfoliere, eritem sau mici erupții.
- **Zilele 3 - 4:** exfolierea se desprinde natural.
- Produse hidratante și reparatoare, dimineața și seara.
- Crustele se lasă să cadă singure, fără a fi îndepărtate.
- Protecție solară și evitarea expunerii la UV.
- Se evită efortul intens, înotul, sauna și alcoolul, care prelungește roșeața.

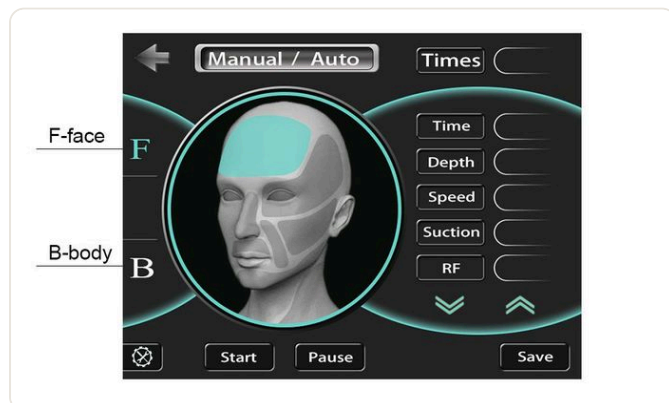

Interfața pentru față

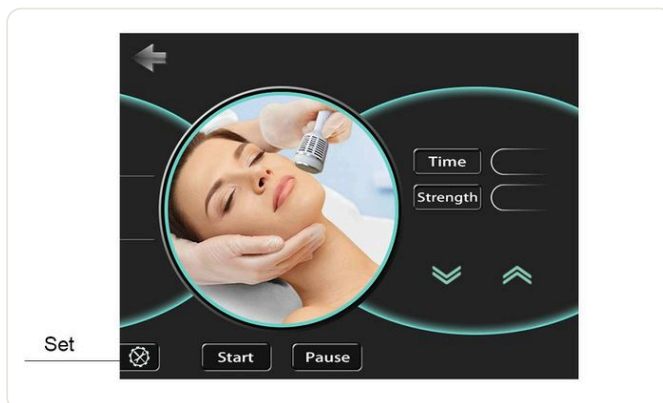

Interfața pentru corp