

VISAGE STUDIO

ECHIPAMENTE PROFESIONALE AVANSATE PENTRU STANDARDE ÎNALTE

Analizator Corporal BCA Premium

Analiză multifrecvență a compoziției corporale prin impedanță bioelectrică (MFBIA), cu imprimantă inclusă în pachet — pentru saloane, centre de remodelare, wellness și fitness.

MĂSOARĂ. PERSONALIZEAZĂ.

**TIPĂREȘTE INSTANT
REZULTATELE.**



20+

parametri
corporali

8

electrozi
de contact

3

frecvențe
de testare

<2 min

durata
testării

Fișă de prezentare și parametri tehnici

DESCOPERĂ PRODUSUL PE VISAGESTUDIO.RO

PREZENTARE

O evaluare completă pentru tratamente personalizate

Analizatorul Corporal BCA Premium folosește tehnologia de impedanță bioelectrică multifrecvență (MFBIA), cu 8 electrozi de contact, pentru a măsura principalii indicatori ai compoziției corporale. Rezultatele ajută specialistul să stabilească valorile inițiale, să personalizeze programul clientului și să urmărească evoluția acestuia de la o evaluare la alta.

1 Evaluare inițială Oferă o imagine de ansamblu asupra compoziției corporale înaintea începerii programului — valori măsurate, nu estimări.	2 Plan personalizat Sprijină alegerea obiectivelor de remodelare, tonifiere, control al greutății sau wellness, pe baza a peste 20 de indicatori.	3 Monitorizare progres Fiecare client are propria înregistrare pe cardul SD, cu funcții de căutare și comparare a rezultatelor în timp.
---	---	---

Analiză prin impedanță bioelectrică multifrecvență (MFBIA), cu 8 electrozi de contact

Braț stâng · braț drept · trunchi · picior stâng · picior drept — măsurate la 3 frecvențe: 20 kHz, 50 kHz și 100 kHz.

FLUX DE LUCRU

Utilizare simplă în 4 pași

1 Introducere date ID client, vârstă (10-99 ani), sex și înălțime (110-230 cm).	2 Urcă pe platformă Descult, cu tălpile poziționate pe electrozi; greutatea este înregistrată automat.	3 Prinde mânerul Electrozii de mână, cu brațele ușor depărtate de corp, în poziție stabilă.	4 Primește raportul Rezultatele apar pe ecran și se tipăresc instant la imprimanta inclusă.
---	--	---	---

Pentru rezultate comparabile, testarea se recomandă la 2-3 ore după masă, cu vezica goală. Aparatul ghidează utilizatorul pe tot parcursul procedurii.

INDICATORI ANALIZAȚI

Peste 20 de valori pentru o imagine completă a compoziției corporale

Compoziție corporală	Controlul greutateii	Evaluări suplimentare
- Greutate corporală - Apă corporală totală (TBW) - Masă grasă - Procent de grăsime corporală (PBF) - Masă corporală fără grăsime - Masă musculară scheletică (SMM) - Proteine - Săruri minerale - Estimarea masei osoase - Raportul de hidratare	- Indice de masă corporală (IMC) - Greutate ideală (IBW) - Greutate-țintă - Controlul recomandat al greutateii - Controlul masei grase - Controlul masei musculare - Raport talie-șold (WHR) - Clasificarea greutateii - Evaluarea nivelului de grăsime corporală	- Metabolism bazal estimat (BMR) - Impedanță bioelectrică segmentală - Evaluare nutrițională orientativă - Evaluarea masei musculare - Evaluarea obezității - Evaluarea generală a compoziției corporale - Recomandări orientative privind activitatea fizică - Recomandări orientative privind alimentația

RAPORT ȘI ISTORIC

Rezultate ușor de urmărit în timp

Fiecare client are propria înregistrare, salvată pe cardul SD, cu funcții de căutare (FIND), deschidere (OPEN) și ștergere (DELETE) a rezultatelor anterioare, pentru compararea evoluției de la o testare la alta.

STOCARE PE CARD SD

Rezultatele se salvează local, fără costuri de abonament.

IMPRIMARE INSTANT

Microimprimantă termică integrată, plus imprimantă cu jet de cerneală A4 inclusă.

IDENTIFICARE PRIN ID

Fiecare client este introdus cu propriul cod de identificare.

ISTORIC CLIENT

Căutare și deschidere rapidă a testărilor anterioare (FIND / OPEN).



Analizatorul BCA Premium

FIȘĂ TEHNICĂ

Parametri tehnici principali

Metodă de analiză	Impedanță bioelectrică multifrecvență (MFBIA)
Zone analizate	Brațul stâng, brațul drept, trunchiul, piciorul stâng, piciorul drept
Electrozi	8 electrozi de contact
Frecvențe de testare	20 kHz, 50 kHz și 100 kHz
Curent de testare	Mai mic de 180 μA - imperceptibil, complet sigur
Capacitate de cântărire	200 kg
Vârsta în software	10-99 ani
Înălțime în software	110-230 cm
Alimentare	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Putere de ieșire	15 VA
Siguranță	FL5X20 / 3,15 A cu tampon (siguranță de rezervă inclusă)
Operare	Ecran tactil
Identificare client	Cod ID introdus manual
Stocarea datelor	Card SD și memorie internă, cu funcții de căutare (FIND), deschidere (OPEN) și ștergere (DELETE)
Transferul datelor	Card SD, USB și Wi-Fi, în funcție de versiune
Imprimare	Microimprimantă termică integrată + imprimantă cu jet de cerneală A4, inclusă în pachet
Dimensiuni aparat	43 x 45 x 116 cm



Vedere frontală · 43 x 45 x 116 cm

Pachet Visage Studio

- Imprimantă cu jet de cerneală inclusă
- Garanție 24 de luni
- Service propriu în România
- Instruire gratuită la achiziție

Siguranță și utilizare responsabilă

Rezultatele sunt orientative și destinate monitorizării în domeniul fitness, wellness și al controlului greutății. Aparatul nu stabilește diagnostice medicale și nu înlocuiește consultația sau investigațiile medicale.

Nu se utilizează la persoane cu stimulator cardiac ori alte dispozitive electronice implantate, la femei însărcinate sau la persoane cu proteze metalice extinse, fără recomandarea medicului.

Document informativ. Specificațiile și accesoriile pot varia în funcție de configurația comercială. Echipament destinat uzului non-medical.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Utilizare corectă și funcții utile

Informații practice pentru efectuarea testărilor în condiții comparabile, gestionarea istoricului clienților și întreținerea corectă a echipamentului, conform manualului de utilizare.

Pregătirea testării

- Testarea se face desculț, cu tălpile poziționate pe electrozi.
- Brațele se țin ușor depărtate de corp, fără să atingă trunchiul.
- Se recomandă testarea la 2-3 ore după masă, cu vezica goală.
- Evitați mișcarea sau vorbitul în timpul testării.

Gestionarea clienților

- Fiecare client este identificat printr-un cod ID unic.
- Rezultatele sunt salvate pe cardul SD și regăsite prin funcția FIND.
- Istoricul testărilor poate fi deschis (OPEN) pentru comparații.
- Înregistrările pot fi șterse (DELETE) direct din interfață.

Întreținere și amplasare

- Ecranul tactil se curăță cu o lavetă moale, ușor umedă, fără alcool.
- Electrozii nu se ating cu unghiile și nu se lovesc sau strâng excesiv.
- Se evită amplasarea în spații umede, prăfuite sau cu câmp magnetic puternic.
- Spațiu liber de minim 30 cm în jurul aparatului, pentru ventilație.

Conținutul pachetului

- Analizator corporal + electrod de mână
- Imprimantă cu jet de cerneală, inclusă în pachet
- Cablu de date și linie de alimentare pentru imprimantă
- Hârtie de imprimare termică pentru microimprimantă
- Set șurub și cheie hexagonală pentru asamblare

Funcții și raportare

Interfață cu ecran tactil, introducere rapidă a datelor clientului (ID, vârstă, sex, înălțime), rezultate afișate instant pe ecran și tipărite la microimprimanta termică integrată sau la imprimanta cu jet de cerneală A4 inclusă în pachet.

Important

Rezultatele sunt orientative și nu reprezintă un diagnostic medical. Aparatul nu se utilizează de persoane cu stimulator cardiac, alte dispozitive electronice implantate, femei însărcinate sau persoane cu proteze metalice extinse ori dizabilități, fără recomandarea medicului. Rezultatele pot fi mai puțin precise la copii în creștere, persoane în vârstă, paciente însărcinate, persoane cu osteoporoză, edeme, dializă sau la sportivi de performanță.