

VISAGE STUDIO

ECHIPAMENTE PROFESIONALE AVANSATE
PENTRU STANDARDE ÎNALTE

Hydrogenera 10 în 1 Combină HydraFacial profesională

Combină cosmetică facială și aparat de hidrodermabraziune într-un singur echipament de cabinet — curățare profundă, reîntinerire, lifting și anti-aging, cu 10 tehnologii integrate și protocol complet într-o singură ședință.

**CURĂȚĂ. HIDRATEAZĂ.
REMODELEAZĂ TENUL.**



10

funcții
integrate

10

manipuli
de lucru

3

rezervoare
de 300 ml

500W

putere
nominală

Fișă de prezentare și parametri tehnici

DESCOPERĂ PRODUSUL PE VISAGESTUDIO.RO

■ PREZENTARE

Un protocol complet de îngrijire facială, într-o singură ședință

Hydrogenera este o combinație cosmetică facială care reunește aparatul de hidrodermabraziune cu vid, infuzia de activi și tehnologiile de fermitate într-o singură consolă de blat. Specialistul parcurge toate etapele tratamentului cu aceeași aparatură și ajustează intensitatea manipul cu manipul, în funcție de tipul de ten.

01

Curățare fără agresiune

Vârful cu vortex de apă și vacuum desprinde sebumul și celulele moarte, cu extracție simultană — fără disconfortul extracției manuale.

02

Activi în profunzime

Electroporarea, ultrasunetele și sprayul cu oxigen cresc pătrunderea serurilor imediat după exfoliere, când pielea este cel mai receptivă.

03

Fermitate vizibilă

Radiofrecvența, biocurenții și manipulul cu bile stimulează colagenul și tonifică musculatura facială, pentru un efect de lifting cumulativ.

Combină HydraFacial cu 10 tehnologii, într-o singură consolă de blat

Hidrodermabraziune • ultrasunete faciale • ultrasunete periorbitale • radiofrecvență • electroporare • vacuum • spray cu oxigen • crioterapie (rece / cald) • biolifting cu microcurenți • skin scrubber ultrasonic

■ FLUX DE LUCRU

Ședința standard, în 4 etape

1

Pregătire și diagnostic

Se evaluează tipul de ten, se demachiază și se aleg soluțiile S1-S3 din cele trei rezervoare de 300 ml.

2

Curățare hidro

Manipulul de hidrodermabraziune și skin scrubber-ul ultrasonic exfoliază și extrag impuritățile din pori.

3

Infuzie de activi

Electroporare, ultrasunete și spray cu oxigen pentru hidratare și transport transdermic al serurilor.

4

Fermitate și finalizare

Radiofrecvență, biolifting cu microcurenți, terapie LED și manipulul rece pentru închiderea porilor. Intensitatea se crește progresiv, în funcție de confortul clientului.

■ BENEFICII

Ce câștigă clientul și cabinetul

Pentru client

- Curățare profundă fără extracție manuală dureroasă
- Hidratare imediată și luminozitate vizibilă de la prima ședință
- Textură mai uniformă și pori vizibil mai mici
- Efect de fermitate care se acumulează de la o ședință la alta

Pentru cabinet

- Zece tehnologii într-un singur aparat, pe un singur blat de lucru
- Un aparat pentru mai multe servicii din meniul cabinetului
- Protocoale ușor de standardizat și de repetat
- Consumabile simple — soluții în rezervoare de 300 ml

FUNCȚII INTEGRATE

Cele 10 funcții și rolul fiecăreia în tratament

Curățare și exfoliere

- **Hidrodermabraziune** — curățare profundă cu vortex de apă și soluții specializate
- **Vacuum / aspirație** — extracția impurităților, drenaj și stimularea circulației
- **Skin scrubber ultrasonic** — exfoliere blândă cu spatulă, desfundarea porilor
- **Crioterapie (cald / rece)** — alternarea temperaturilor pentru închiderea porilor și calmarea tenului

Hidratare și infuzie

- **Electroporare** — mezoterapie fără ac, pentru pătrunderea substanțelor active
- **Ultrasunete faciale** — microvibrații care cresc absorbția produsului
- **Ultrasunete periorbitale** — manipol dedicat zonei delicate din jurul ochilor
- **Spray cu oxigen** — pulverizare fină de oxigen și nutrienți pentru revitalizare

Lifting și fermitate

- **Radiofrecvență (RF)** — încălzire controlată a dermului, stimularea colagenului și a elasticității
- **Biolifting cu microcurenți** — tonifierea neinvazivă a musculaturii faciale
- **Terapie LED** — lumină roșie, albastră și verde, pentru obiective diferite
- **Manipol cu bile de masaj** — drenaj și relaxare pe conturul feței

MANIPULI ȘI ACCESORII

Zece manipuli, fiecare cu rolul lui

01 · Manipul rece	Calmare, închiderea porilor, reducerea roșeții după tratament
02 · Ultrasunete ochi	Zona periorbitală — cearcăne, linii fine, puffiness
03 · Ultrasunete față	Absorbția activelor pe suprafețe mari
04 · Spatulă (skin scrubber)	Exfoliere ultrasonică și desfundarea porilor
05 · Manipul de lifting	Radiofrecvență și biolifting pe conturul feței
06 · Manipul de aspirație	Vacuum, extracția punctelor negre, drenaj
07 · Manipul cu microcurenți	Tonifierea musculaturii, efect de lifting
08 · Spray de produs	Pulverizare fină de ser sau soluție hidratantă
09 · Manipul hidro (bubble)	Hidrodermabraziune cu vortex de apă și oxigen
10 · Manipul cu bile	Masaj de drenaj, relaxare și stimulare circulatorie



Suportul frontal cu manipuli

Sistemul de soluții

- 3 rezervoare transparente de 300 ml (S1 · S2 · S3)
- Recipient separat pentru colectarea impurităților
- Valve reglabile pentru debitul de apă și de aer
- Nivel vizibil, pentru control rapid în timpul ședinței

FIȘĂ TEHNICĂ

Parametri tehnici principali

Tip echipament	Combină cosmetică facială multifuncțională / aparat de hidrodermabraziune, model de blat (desktop)
Funcții integrate	10 — hidrodermabraziune, ultrasunete, RF, electroporare, vacuum, oxigen, cald/rece, biolifting, LED, skin scrubber
Manipuli	10 manipuli de lucru, pe suport frontal și laterale
Interfață	Ecran tactil color, cu selecție de funcție și reglaj de intensitate
Rezervoare soluții	3 x 300 ml, transparente + recipient de colectare a impurităților
Reglaje flux	Valvă de reglaj apă și valvă de reglaj aer
Terapie LED	Lumină roșie, albastră și verde
Alimentare	220 V ± 22 V, 50 Hz ± 1 Hz, priză cu împământare
Putere	500 W
Clasă de protecție	Echipament de tip B
Condiții de utilizare	Temperatură 5-40 °C, umiditate relativă sub 80%, spațiu liber minim 5 cm în jurul aparatului
Condiții de depozitare	Temperatură -10...40 °C, umiditate relativă sub 93%, ambalajul original
Documentație	Manual în limba română, declarație de conformitate, certificat de garanție
Garanție	24 de luni, cu service post-garanție asigurat 5 ani



Vedere laterală

Consolă de blat

Pachet Visage Studio

- Garanție 24 de luni
- Service post-garanție 5 ani
- Service propriu în România
- Training gratuit și suport tehnic
- Finanțare în rate
- Manual în limba română

Siguranță și utilizare responsabilă

Echipamentul este destinat uzului cosmetic profesional și se folosește exclusiv de către personal instruit. Nu stabilește diagnostice medicale și nu înlocuiește consultația de specialitate. Intensitatea se reglează progresiv, de la valori mici către valori mari, în funcție de toleranța clientului.

Nu se utilizează pe piele lezată, inflamată sau cu dermatită de contact, la persoane cu implanturi metalice ori dispozitive electronice implantate, la femei însărcinate sau care alăptează, la persoane cu afecțiuni cardiace, hipertensiune severă, diabet, tulburări de coagulare, febră sau boli acute, ori la minori.

Livrare și punere în funcțiune

- Livrare prin curier, în ambalaj de protecție; transport gratuit peste 150 lei.
- Aparatul se despachetează și se verifică la primire, împreună cu accesoriile.
- Nu necesită instalare specială — se conectează la o priză cu împământare.
- Training gratuit și suport tehnic din partea Visage Studio.

Consumabile și mentenanță

- Soluții de curățare și seruri compatibile, în rezervoare de 300 ml.
- Vârfuri și accesorii de schimb pentru manipulu de hidrodermabraziune.
- Piese de schimb se achiziționează de la furnizor sau de la distribuitor.

■ INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Utilizare corectă și întreținere

Informații practice pentru pregătirea ședinței, întreținerea manipulilor și amplasarea corectă a echipamentului în cabinet.

Înainte de ședință

- Se verifică integritatea cablului, a manipulilor și a conexiunilor.
- Manipulul se conectează la interfața corespunzătoare, marcată pe carcasă.
- Rezervoarele se completează cu soluțiile potrivite tipului de ten.
- Se testează funcționarea și se reglează valvele de apă și de aer.

În timpul tratamentului

- Intensitatea se crește treptat, urmărind reacția și confortul clientului.
- Manipulii se mențin în mișcare continuă, fără staționare pe aceeași zonă.
- La orice disconfort, tratamentul se oprește imediat.
- Manipulii nu se schimbă cu aparatul pornit.

Întreținere și amplasare

- Suprafață stabilă, uscată, ferită de umiditate, praf și lumină solară directă.
- Minimum 5 cm spațiu liber în jurul aparatului, pentru ventilație.
- Manipulii se curăță după fiecare utilizare și se așază pe suport.
- Rezervoarele se golesc și se clătesc la final de zi.
- Reparațiile se efectuează numai de personal autorizat.

Indicații de tratament

- Ten congestionat, pori dilatați, puncte negre și exces de sebum.
- Deshidratare, ten lipsit de luminozitate, textură neuniformă.
- Linii fine, pierderea fermității și a conturului facial.
- Îngrijire periorbitală — cearcăne și aspect obosit.
- Protocoale de întreținere lunare și pregătire pre-eveniment.

Conținutul pachetului standard

Combina HydraFacial Hydrogenera 10 în 1 (unitate principală) · cei 10 manipuli de lucru · 3 rezervoare de soluție de 300 ml și recipient de colectare · cablu de alimentare · accesorii și consumabile de pornire · manual de utilizare în limba română · declarație de conformitate și certificat de garanție.

Ritmul recomandat al ședințelor

Cură inițială. Pentru ten congestionat sau deshidratat, o serie de ședințe la interval de 7-14 zile, stabilită de specialist în funcție de răspunsul pielii.

Întreținere. O ședință lunară pentru menținerea rezultatului, respectiv o ședință cu 3-5 zile înainte de un eveniment, pentru luminozitate maximă.

IMPORTANT

Aparatul este destinat exclusiv uzului cosmetic profesional și nu are rol de diagnostic sau de tratament medical. Rezultatele sunt individuale și depind de tipul de ten, de protocolul aplicat și de numărul de ședințe. Utilizarea în afara indicațiilor din manual anulează garanția și poate produce leziuni. Pentru contraindicații, consultați integral manualul de utilizare livrat cu echipamentul.